

Faites-le avec JUVÉDERM^{MD}

Les produits de comblement facial JUVÉDERM^{MD} sont des gels injectables indiqués pour modeler et définir plusieurs zones du visage.



Apparence naturelle



Résultats durables, jusqu'à 24 mois selon le produit



Plus de 90% des patients satisfaits



Première marque mondiale de produits de comblement à l'acide hyaluronique*

* Selon une recherche de suivi menée auprès de plus de 1 000 professionnels de la santé dans treize des plus grands marchés mondiaux de l'esthétique.

Traitements

- Lisser les rides autour des yeux
- Relever les sourcils et augmenter leur projection
- Améliorer l'apparence de la zone sous les yeux
- Apporter du volume aux tempes
- Ajouter du volume aux joues
- Lisser les rides autour de la bouche
- Donner du volume aux lèvres et améliorer leur définition
- Définir le menton et le contour de la mâchoire
- Hydrater et lisser la peau



AVANT



APRÈS*


* La femme sur la photo a été traitée avec JUVÉDERM^{MD}. Les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre.

Votre traitement JUVÉDERM^{MD} aujourd'hui :

(Veuillez cocher les cases pertinentes ci-dessous)

Zones de traitement :

- Yeux
- Sourcils
- Sous les yeux
- Tempes
- Joues
- Autour de la bouche
- Lèvres
- Menton
- Mâchoire
- Peau (hydratation)

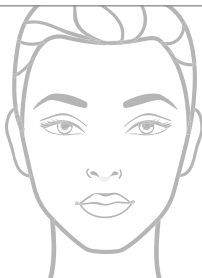

Produits utilisés :

- VOLUX^{MC}
- VOLUMA^{MD}
- VOLIFT^{MD}
- VOLBELLA^{MD}
- VOLITEMC
- ULTRA
- ULTRA XC
- ULTRA PLUS
- ULTRA PLUS XC

Soins après traitement

Votre professionnel de la santé vous expliquera ce à quoi vous devez vous attendre après un traitement JUVÉDERM^{MD}.

Il se peut que vous ayez une rougeur, une enflure, une démangeaison, une douleur, un nodule, une bosse, des ecchymoses ou une décoloration temporaires au point d'injection. Si cela se produisait, appliquez un sac de glace ou une compresse froide. Si les symptômes persistent plus d'une semaine ou si tout autre effet secondaire survenait, consultez votre professionnel de la santé dans les meilleurs délais. Veuillez lire au verso d'autres renseignements importants sur les effets secondaires possibles.

Au cours des 12 heures suivant le traitement, **évit**ez :

- Le port de maquillage

Au cours des 2 semaines suivant le traitement, **évit**ez :

- L'exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV
- Les températures inférieures à 0 °C
- La pratique du sauna, du bain de vapeur ou du hammam
- Le massage de la zone traitée ou une pression sur cette zone pendant quelques jours

Veuillez lire au verso d'autres considérations importantes relatives au traitement.

Communiquez avec nous

Prochain rendez-vous

Notes après traitement

Information sur l'innocuité de JUVÉDERM^{MD}

JUVÉDERM^{MD} est une famille d'implants injectables indiqués pour lisser les sillons et les rides, rehausser les lèvres, traiter les rides péribuccales et les commissures buccales et restaurer le volume dermique des joues et du contour de la mâchoire.

Votre médecin vous demandera vos antécédents médicaux afin de déterminer si les produits JUVÉDERM^{MD} vous conviennent. Informez votre professionnel de la santé si vous avez :

- Des allergies graves avec des antécédents de choc anaphylactique, des allergies graves multiples, des allergies à l'acide hyaluronique ou à d'autres produits de comblement, ou des allergies à la lidocaïne ou à d'autres anesthésiques locaux.
- Des antécédents de maladie auto-immune, d'angines récidivantes, de rhumatisme articulaire aigu, d'épilepsie ou de porphyrie.

Vous et votre professionnel de la santé devez discuter des importantes considérations suivantes avant le traitement afin d'éviter des résultats insatisfaisants et des complications :

- Vous prenez des médicaments susceptibles de prolonger le saignement, comme l'acide acétylsalicylique (aspirine), des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anticoagulants, car comme avec toute injection, vous pouvez avoir des saignements prolongés. Vous devez informer votre professionnel de la santé si vous prenez des médicaments.
- Vous avez eu récemment d'autres traitements de la surface de la peau (comme un traitement au laser, une exfoliation chimique ou une dermabrasion) ou avez déjà utilisé des produits de comblement.
- Vous avez une infection ou une inflammation cutanée comme l'acné ou l'herpès labial.
- Vous avez une prédisposition à la cicatrisation excessive.
- Vous êtes enceinte ou vous allaitez, ou vous avez moins de 18 ans (moins de 21 ans s'il s'agit d'un traitement des lèvres), car l'innocuité des produits JUVÉDERM^{MD} n'a pas été établie.

Les effets secondaires potentiels associés à l'utilisation des produits JUVÉDERM^{MD} incluent des réactions temporaires au point d'injection, comme une rougeur, une enflure, une démangeaison, une douleur, un nodule, une bosse, des ecchymoses et une décoloration. Ces réactions peuvent se produire immédiatement ou à retardement et durer jusqu'à une semaine. L'injection dans les lèvres peut causer plus d'œdème et d'ecchymoses en raison de la physiologie particulière de ces tissus. Comme pour toute injection, il y a un risque d'infection. Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. La persistance de réactions inflammatoires au-delà d'une semaine ou l'apparition de tout autre effet secondaire doit être signalée à un professionnel de la santé dès que possible.

FA-JUV-AfterCareTearPad-20F
CA-JUV-2050019

JUVÉDERM^{MD}, VOLUMA^{MD}, VOLIFT^{MD}, VOLBELLA^{MD}, VOLITE^{MC}, VOLUX^{MC}, ULTRA PLUS, ULTRA PLUS XC, ULTRA, ULTRA XC et les dessins sont des marques déposées d'Allergan Holdings France SAS ou de ses sociétés affiliées, utilisées sous licence par Allergan Inc.

Tous les droits sont réservés. © 2020 Allergan.